




ECG MINI

Personal ECG Tracker

Event Recorder

Quick Guide

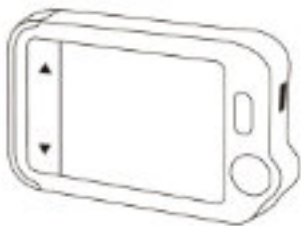

Italiano

Guida rapida

Indice

Disclaimer	36
Attenzione	36
Disimballaggio	36
Informazioni sull'unità principale	37
Software desktop.....	38
Set Up	38
Caricamento	38
Accensione/spegnimento	39
Impostazioni iniziali	39
Primo controllo	40
Visualizza i risultati	41
Esaminare le registrazioni.....	41
Risoluzione dei problemi	50
Specifiche	50

1.Disclaimer

Questa apparecchiatura non è un dispositivo medico e non deve essere utilizzato per scopi medici o per condizioni mediche. Questo prodotto è destinato esclusivamente ad un uso generico per benessere.


2.Attenzione

- Le persone con pacemaker NON possono usare questo prodotto.

3.Disimballaggio

Unità principale; Guida rapida; Custodia per il trasporto; cinghia tracolla.

4. Informazioni sull'unità principale

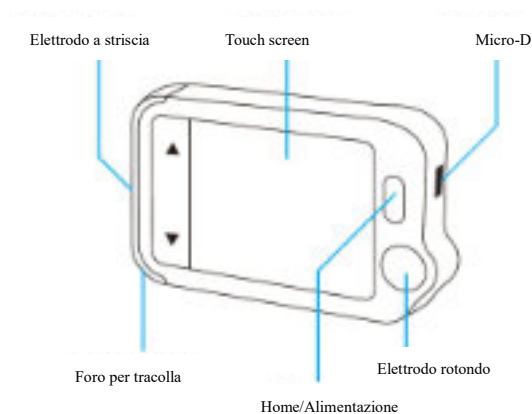

7.2 Accensione/spengimento

Tenere premuto il pulsante home per 1 secondo per accendere e 3 secondi per spegnere.



Si **spegne automaticamente** se non è in funzione o non sta misurando.

7.2 Impostazioni iniziali

Quando l'apparecchio viene acceso per la prima volta, impostare la data e l'ora attuali.



7.3 Primo controllo

1) Nella homepage, toccare l'icona **Heart Check**, quindi scegliere **un canale ECG di tipo II** (leggere le note).



2) Tenere il dispositivo come indicato sul display del dispositivo.

3) Rimanere fermi e rilassati mentre si effettuano le misurazioni fino al completamento. Successivamente verranno visualizzati i risultati.

Verrà effettuata una misura di 30 secondi con resoconto finale della misurazione.

- *Toccare l'elettrodo rettangolare sul retro dell'apparecchio influisce con minor importanza.*

7.4 Visualizza i risultati

Ci sono 6 tipi di risultati di misurazione, Toccare l'icona "i" per visualizzare le definizioni specifiche.

Toccare l'icona "▶" per riprodurre le forme d'onda dell'ECG.

Toccare l'icona "C" per effettuare nuove misurazioni.


È possibile utilizzare il **tasto home** in qualsiasi momento per tornare alla homepage o annullare le misurazioni.




7.5 Esaminare le registrazioni

Sulla homepage, toccare l'icona della **Cronologia** per rivedere i risultati della cronologia.

È possibile scegliere una registrazione per rivedere i risultati e toccare l'icona "▶" per riprodurre le forme d'onda ECG registrate.

Toccare l'icona "  " per cancellare la registrazione corrente.

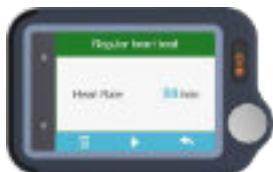

8.4. Capire i risultati

Frequenza
cardiaca

	<p>Il numero di volte che il cuore batte al minuto calcolato dall'ECG.</p> <p>Il range di riferimento per gli adulti è di 50-100 battiti al minuto in stato di rilassamento e superiore se stimolati. Controllate la vostra frequenza cardiaca massima durante il fitness o l'esercizio fisico per evitare di sovraffaticare il cuore.</p>
ECG	<p>Un elettrocardiogramma (ECG) è un test che registra l'attività elettrica del cuore.</p> <p>Battito cardiaco regolare - l'ECG registrato mostra un andamento normale e regolare.</p> <p>Battito cardiaco irregolare - l'ECG registrato mostra uno schema irregolare. Può essere causata da uno stress eccessivo del cuore o da altre condizioni.</p>
Segnale debole	<p>Bassa ampiezza del segnale o rumore. Passare alla modalità II può essere d'aiuto.</p>

Impossibile analizzare	La registrazione dell'ECG è incompleta.
---------------------------	-----------------------------------------

8.5. Impostazioni

Modalità utente: Impostazioni->Modalità utente->toccare per scegliere le modalità Un utente/Due utenti.

Quando si passa alla modalità Utente duale, la homepage mostra le icone Utente A e Utente B. Scegliere un utente per iniziare a effettuare le misurazioni e i risultati saranno contrassegnati con A o B.

In modalità utente singolo, i risultati non sono contrassegnati.

Luminosità: Impostazioni-> Toccare il misuratore di luminosità per regolare la luminosità.

Voce: Impostazioni->Toccare l'interruttore Voce per attivare e disattivare la voce del battito cardiaco.

Altre impostazioni: Data e ora, cancellazione dati, reset di fabbrica, informazioni su.

9. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il dispositivo non si accende.	1. La batteria potrebbe essere scarica. 2. Il dispositivo potrebbe essere danneggiato.	1. Caricare la batteria e riprovare. 2. Contattare il distributore locale.
L'indicatore di batteria scarica lampeggia.	La batteria è scarica.	Caricare la batteria e riprovare.
L'ampiezza della forma d'onda ECG è piccola	Il cavo che avete scelto non è adatto.	Cambiatelo con un altro cavo e riprovate.
La forma d'onda ECG fluttua o scompare e viene visualizzato "Controlla contatto".	1. La pressione esercitata sull'elettrodo non è stabile o troppo elevata. 2. La mano o il corpo possono essere in movimento.	1. Tenere il dispositivo in modo che sia stabile. 2. Cercare di rimanere perfettamente fermi e rieseguire il test.

10. Specifiche

Dimensioni	88×56×13 mm
Peso	64 g (unità principale)
Display	Touch screen da 2,4", a colori, retroilluminato
Tipo di batteria	Batteria ricaricabile ai polimeri di litio
Tempo di funzionamento della batteria	>500 controlli
Tempo di ricarica	2 -3 ore
Intervallo della frequenza cardiaca	Da 30 a 250 bpm
Conservazione	30s x 100 pezzi
Utente	Uno o due
Lunghezza ECG	30s, 60s, 5 minuti

DISTRIBUITO IN ITALIA IN ESCLUSIVA da:



**Via B. Gigli, 20 -
20090 Trezzano s/N
(Milano) - ITALY**

Tel: +39 02-4453087

Mail: info@webbit.it



4E, Building 3, Tingwei Industrial Park, No. 6 Liufang Road,
Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong,
518101, P.R. China
www.getwellue.com
Contact us: service@viamotech.com